



Leštění s

TWIST™ DIA Zirconia

Jemný lesk ve 3 krocích

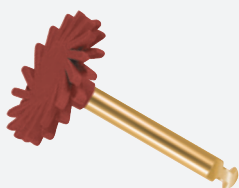

COARSE / HRUBÝ
PŘEDLEŠTĚNÍ

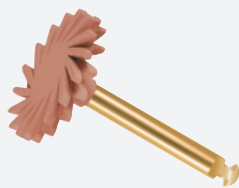

MEDIUM / STŘEDNÍ
LEŠTĚNÍ



FINE / JEMNÝ
LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK VYTVOŘIT PŘIROZENÝ LESK

Inovativní tvar s flexibilními lešticími kotouči vytváří přirozený lesk na všech zirkonových výplních. Nezáleží na tom, zda jsou povrchy rovné, konvexní nebo konkávní, diamantem impregnované kotouče je vyleští do vysokého lesku.

BENEFITY

- Flexibilní lešticí kotouč pro zušlechťování všech typů zubních povrchů
- Velmi vhodné pro okluze
- Modelování zirkonové výplně je zachováno
- Sterilizovatelné a opakovaně použitelné
- Ekonomická efektivita díky vysoké odolnosti a opakovanému použití

NASKENUJTE PRO
ZOBRAZENÍ NÁVODU K
POUŽITÍ PRODUKTU



Okluzní



Incisální



Labiální



Bukální



Lingvální



Appoximální

DOPORUČENÉ A MAXIMÁLNÍ OTÁČKY

Doporučená rychlost: 7 000 – 10 000 min pro Coarse (hrubý) /Medium (střední) /Fine (jemný)

Maximální otáčky: 20 000 rpm

TWIST™ DIA Zirconia

Systém pro povrchovou úpravu a leštění zirkonia

#1302-IP COARSE (hrubý) 14mm (10 ks)

#1305-IP FINE (jemný) 14mm (10 ks)

#1303-IP MEDIUM (střední) 14mm (10 ks)

#1301-IP Introductory Kit 14mm (3 ks)

LEŠTĚNÍ KOMPOZITU S TWIST™ DIA

Inovativní tvar s flexibilními lešticími kotouči nabízí zubnímu lékaři různé výhody pro vynikající lešticí výsledky. Více informací: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Před použitím tohoto produktu si nezapomeňte přečíst návod k použití produktu.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vytiskovaná barva se může mírně lišit od skutečné barvy.

Distribuuováno společností:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Německo, +49 (0)69-30 535 835, dental.eu@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu

Distributor pro ČR: D-way CZ, Nad Červenkou 417, 293 01, Mladá Boleslav, info@d-way.cz, +420 775 267 184



06/2021