



Ovládni všechny své výzvy



initial[™]

VYPALOVACÍ PĚNA

 Technický manuál

GC

GC Initial VYPALOVACÍ PĚNA

Speciální žáruvzdorný podpurný materiál pro keramické vypalování

Pěna pro vypalování GC Initial FOAM je vhodná pro všechny keramické systémy GC Initial a zajišťuje stabilní uchycení produktů na keramických výpalných podpěrách.

INDIKACE


- Inlaye, onlaye, korunky, fazety, můstky

VÝHODY

- Snadná aplikace díky speciální krémové textuře
- Dimenzionální stabilita zaručená během procesu vypalování
- Dokonalé rozložení tepla na členy
- Snadné vyjmutí po vypálení

NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ

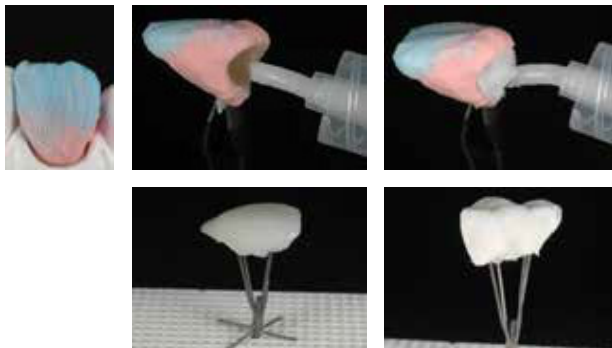

- Pěnu aplikujte přímo ze stříkačky do korunky nebo na keramický člen
- Jemně položte korunku nebo keramický člen na čep držáku

ODSTRANĚNÍ

- Po vypálení rychle odstraňte ztuhlou pěnu vhodným nástrojem pod tekoucí vodou
- Pokud je to nutné, vypiskujte neabrazivními skleněnými perly při maximálním tlaku 2 bary

POZNÁMKA

Vyhňte se kontaktu mezi pěnou keramikou. Pěna by se měla používat jen v množství, které je skutečně nezbytné. Při použití keramiky s nízkým bodem tání (např. GC Initial LF / GC Initial LiSi) se doba schnutí zvyšuje až o 8 minut.

UKLÁDÁNÍ

Stříkačku pevně zavřete, aby se do ní nedostal vzduch. Skladujte na chladném a suchém místě.

BALENÍ

1 x 10g balení pěny GC Initial BURN

POZOR

Vždy noste osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, rouška a brýle.

Některé produkty uvedené v návodu k použití mohou být podle GHS klasifikovány jako nebezpečné.

Podívejte se na bezpečnostní listy dostupné na: <http://www.gceurope.com> nebo pro Ameriku: <http://www.gcamerica.com>. Mohou být také požádány od dodavatele.

Poznámky

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



GC EUROPE N.V.

Výzkumný park Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental, <https://europe.gc.dental>

ODPOVĚDNÝ VÝROBCE V KANADĚ GC
AMERICA INC.
3737 West 127th Street, USA-Alsip, IL. 60803

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, USA-Alsip, IL.
60803 tel. +1.708.597.0900, fax.
+1.708.371.5103
www.gcamerica.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstr. 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental, <https://europe.gc.dental/de-DE>

GC ITALIA S.r.l.
Via Luigi Cadorna 69, I-20055 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 98 28 20 68
info.italy@gc.dental, <https://europe.gc.dental/it-IT>

GC UNITED KINGDOM Ltd.
16-23 Coopers Court, Coopers Court,
Newport Pagnell, UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.dental, <https://europe.gc.dental/en-GB>

GC FRANCANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie
Cedex tel. +33.1.49.80.37.91, fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, <https://europe.gc.dental/fr-FR>

GC IBÉRICA - Dentální produkty, S.L.
Codesa 2 Building, Playa de las Américas, 2, 1°, Of.
4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, <https://europe.gc.dental/es-ES>

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Rein u Grazu
Tel. +43.312.45.40.20, Fax. +43.312.45.40.20.40
info.austria@gc.dental, <https://europe.gc.dental/de-AT>

GC Europe NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental, <https://europe.gc.dental/fr-BE>

GC EUROPE N.V. - Východoevropská
kancelář Siget 19b, HR-10020 Záhřeb
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental, www.eeo.gceurope.com

GC NORDIC AB - Finská pobočka
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental, <https://europe.gc.dental/fi-FI>

GC severská dánská pobočka
c/o Andersen Partners, Advokatpartnerselskab
Buen 11, 6, DK-6000 Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental, <https://www.gc.dental/europe/da-DK>

GC NORDIC AB
c/o Lundin Auditing Firm
Erik Dahlbergsgatan 11B - S-411 26 Göteborg – Švédsko
tel. +46.768.54.43.50, fax. +46 8 555 788 05
info.nordic@gc.dental, <https://www.gc.dental/europe/sv-SE>

GC AUSTRIA GmbH - švýcarská kancelář
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tél. +41.41.520.01.78, fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, <https://europe.gc.dental/de-CH>

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow, Sydney, NSW 2019, Austrálie
Tel: +61.2.9301.8200, Fax: +61.2.9316.4196

GC JIŽNÍ AMERIKA
Rua Heliadora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRAZÍLIE
PSČ: 02022-051 - TELEFON: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61
ODPOVĚD. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2,
Singapur 529541
TEL: +65 6546 7588

