

Vícevrstvé Vysoce translucentní Hybridní keramické bločky

KATANA™ AVENCIA™ Block 2



2 efektivní a estetické možnosti pro jednočlenné náhrady

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 je hybridní keramický bloček druhé generace, který byl vyvinut s ohledem na vaše aktuální potřeby. Ať už chcete v rámci svého ordinačního CAD/CAM pracovního postupu vyrábět inleje, onleje, fazety nebo korunky, obě dostupné varianty vám nabídnou vše, co potřebujete.

Bloček KATANA™ AVENCIA™ Block 2 Multi-Layer (ML) je určen pro výrobu korunek s přirozeným vzhledem, zatímco bloček KATANA™ AVENCIA™ Block 2 High-Translucent (HT) je předurčen pro inleje a onleje.



Využijte potenciál každé nepřímé jednočlenné náhrady


- ✓ **Časově efektivní pracovní postup**
Bez nutnosti vypalování: Ušetřete drahocenný čas a snižte provozní náklady.
- ✓ **Vynikající mechanické vlastnosti**
KATANA™ AVENCIA™ Block 2 nabízí pevnost, kterou potřebujete pro spolehlivé jednočlenné náhrady.
- ✓ **Příznivé vlastnosti z hlediska opotřebení**
Hladký, vyleštěný povrch snižuje opotřebení antagonistů, zatímco vynikající odolnost vůči opotřebení zajišťuje dlouhodobé zachování lesku a estetiky.
- ✓ **Přirozený lesk v krátkém čase** Dosáhněte brilantního, vysoce lesklého povrchu rychle, čímž ušetříte čas a zvýšíte efektivitu pracovního postupu.
- ✓ **Flexibilní přizpůsobení** Uzpůsobitelný poměr skloviny a dentinu: Upravte polohu náhrady v bločku tak, aby esteticky odpovídala individuálním potřebám každého pacienta.
- ✓ **Brilantní estetika** Dokonalá optická integrace a vysoce lesklý povrch.
- ✓ **Jednoduché postupy upevňování**
Náhrady lze upevnit buď pomocí samoadhezivních pryskyřičných cementů, nebo pryskyřičných cementů, které vyžadují samostatné použití primeru.
- ✓ **Možnost frézování za sucha**
Možnost volby mezi frézováním za mokra a za sucha otevírá nové možnosti zpracování – např. ve vaší partnerské laboratoři.

Přirozený vzhled

High-Translucent (HT): Vyšší translucence a optimalizovaná světlost, vaše náhrada bude vypadat přirozeně i v okrajových oblastech – a dokonale splyne s okolním chrupem. Plynulý barevný přechod (ML): Vícevrstvá struktura napodobuje přirozené barevné přechody zubů.

Vyšší translucence

KATANA™ AVENCIA™ Block (nízká translucence) A2 LT

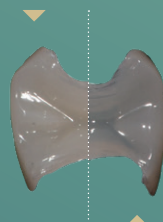

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 (vysoká translucence) A2 HT

Vícevrstvá struktura

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 (vícevrstvý) A2 ML



KATANA™ AVENCIA™ Block (jednovrstvý) A2 LT

Ušetřete drahocenný čas a poskytněte kvalitní stomatologické ošetření přímo v ordinaci díky tomuto jednoduchému postupu.

1 Preparace

Preparujte zubní tkáň obvyklým způsobem.

2 Návrh a zpracování

Vyberte odstín a velikost produktu, které odpovídají konkrétnímu případu. Navrhněte a zpracujte bloček KATANA™ AVENCIA™ 2 pomocí svého preferovaného CAD/CAM systému.

3 Tvarování a leštění

Vytvarujte náhradu obvyklým způsobem. Použijte lešticí pastu TWIST™ DIA for Composite, abyste v krátké době dosáhli brilantního, vysoce lesklého povrchu, což zvýší estetiku a spokojenost pacienta.

4 Opískování

Přípravte protetickou náhradu tak, že adhezivní povrch opískujete práškem z oxidu hlinitého (30–50 µm) při tlaku vzduchu 1–2 bary.

5 Čištění

Po zkušebním nasazení naneste na povrch náhrady a zubu přípravek KATANA™ Cleaner. Tím odstraníte nečistoty a zvýšíte vazebnou pevnost, což zajistí dlouhou životnost náhrady.

6 Leptání a upevňování

Zvolte vhodný postup leptání (samoleptání, selektivní leptání nebo leptání a oplachování) pro předběžnou úpravu povrchu zubu. Postupujte podle pokynů pro použití PANAIA™ SA Cement Universal nebo PANAIA™ V5, abyste zefektivnili pracovní postup a dosáhli trvalého spojení.

Odstíny a velikosti

Vícevrstvé odstíny (ML)

- A1 ML, A2 ML, A3 ML, A3.5 ML

Vysoce translucenční odstíny (HT)



- A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT

Dostupné velikosti:



- Velikost 12: 10(A) × 12(B) × 15(C) mm (pouze HT)
- Velikost 14L: 14,5(A) × 14,5(B) × 18(C) mm

NOVINKA:
Je možné
i frézování
za sucha!

Pro CEREC

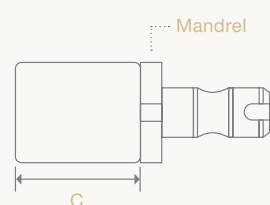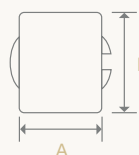

Pro UNIVERSAL

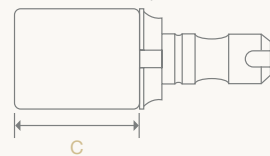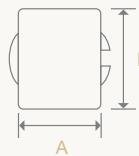

Sortiment produktů KATANA™ AVENCIA™ Block 2

(HT) Universal

Velikost 12 (5 bločků)

#4151-EU 12/A1	#4156-EU 14L/A1
#4152-EU 12/A2	#4157-EU 14L/A2
#4153-EU 12/A3	#4158-EU 14L/A3
#4154-EU 12/A3.5	#4159-EU 14L/A3.5

(ML) Universal

Velikost 14 (5 bločků)

#4181-EU 14L/A1
#4182-EU 14L/A2
#4183-EU 14L/A3
#4184-EU 14L/A3.5

(HT) CEREC

Velikost 12 (5 bločků)

#4166-EU 12/A1	#4171-EU 14L/A1
#4167-EU 12/A2	#4172-EU 14L/A2
#4168-EU 12/A3	#4173-EU 14L/A3
#4169-EU 12/A3.5	#4174-EU 14L/A3.5

(ML) CEREC

Velikost 14 (5 bločků)

#4186-EU 14L/A1
#4187-EU 14L/A2
#4188-EU 14L/A3
#4189-EU 14L/A3.5