

## **Návod k použití**

Blue Shine

(CS)

### **【Pokyny k použití】**

Naneste pastu na kartáček nebo lešticí kotouček a vyleštěte protetické náhrady.

### **【Použití】**

Kompozitní pryskyřice, kovové slitiny a akrylové materiály.

### **【Upozornění】**

1. Plstěná kolečka apod. by měla být používána výhradně s tímto produktem a neměla by být používána s jinými abrazivy.
2. Plstěná kolečka apod., na která jsou nanášeny abrazivní materiály, musí být při použití oddělena podle typu protetických materiálů.
3. Po leštění musí být protetické materiály důkladně omyty vodou.
4. Při leštění dentálních výrobků tímto materiálem je nutné používat ochranné brýle, lokální odsávání prachu a respirátory schválené příslušnými institucemi, aby se zabránilo škodlivému působení prachu a rozstříku na lidský organismus.
5. Dbejte na to, aby se tento materiál nedostal do očí. V případě zasažení očí ihned vyplachujte velkým množstvím tekoucí vody a vyhledejte očního lékaře.
6. Přestaňte tento produkt používat, pokud se před použitím nebo během použití objeví jakýkoli problém, například kontaminace cizí látkou.
7. Nepoužívejte tento produkt v ústech.

### **【Důležité upozornění】**

1. Uživatel, který má vyrážku, dermatitidu nebo jinou přecitlivělost na tento materiál, by měl používat rukavice a vyhnout se přímému kontaktu s tímto materiálem.
2. Uživatel, u kterého se v důsledku používání tohoto materiálu objeví příznaky přecitlivělosti, jako jsou vyrážka, ekzém, zarudnutí, ulcerace, otok, svědění nebo necitlivost, by měl přestat výrobek používat a vyhledat lékařskou pomoc.

### **【Skladování】**

- Uchovávejte tento produkt na chladném a tmavém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje ohně.
- Nenechávejte obal během používání ani po použití otevřený.
- Po otevření obalu skladujte v uzavřené nádobě.

### **【Informace o likvidaci】**

Zbývající zásoby musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými národními právními předpisy.

### **【Možné nebezpečí】**

Tento produkt může způsobit alergické reakce, jako jsou vyrážky a dermatitida.

### **【Vyrobeno společností:】**



**YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**  
54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp);

Web: [www.yamahachi-dental.co.jp](http://www.yamahachi-dental.co.jp)

2022.01 (Ver.1)