

RE-FINE BRIGHT (Typ 1 dle ISO 10477; Typ 2, třída 1 dle ISO 20795-1)

Postup polymerace: samopolymerující

Hlavní složky: poly(metyl-metakrylát) (PMMA), metyl-metakrylát (MMA), pigmenty

Anorganické plnivo: 0 %

Příprava kovového povrchu: použijte makromechanickou retenci

Výběr odstínu: <světlé> A2 – A3 – A3.5 <tmavé>

Míchací poměr: prášek / tekutina = 10 g / 5 ml při 23 °C

Doba zpracování: 1 min

Doba tuhnutí: 3 min 30 s

【Určené použití】

Zhotovení zubních korunek a můstků, opravy zubních náhrad (protéz).

【Kontraindikace】

Nepoužívejte u pacientů s anamnézou přecitlivělosti (např. vyrážka nebo dermatitida) na tento materiál nebo na monomery na bázi MMA.

Nedovolte, aby hnětený produkt nebo tekutý materiál byl v dlouhodobém kontaktu s pokožkou.

Nevdechujte těkavé složky tekutého materiálu (páry monomeru).

【Pokyny k použití】

(Technika štětkováním – “brush-on”)

1. Nasypte prášek do nádoby a malé množství tekutiny do silikonového kalíšku.
2. Pomocí štětce naneste tenkou vrstvu tekutiny na oblast, kterou chcete navrstvit.
3. Hrotem štětce se dotkněte prášku a vytvořte na hrotu štětce „bahnitou“ (kašovitou) pryskyřici.
4. Tuto pryskyřici naneste/nahromaděte na budovanou oblast.
5. Opakujte kroky (3) až (4), dokud nedosáhnete požadovaného tvaru.
6. Broušení a leštění provádějte obvyklým způsobem.

(Technika mícháním)

1. Odvažte tekutinu v poměru 0,5 ml tekutiny na 1 g prášku. Suroviny rychle promíchejte špachtlí apod.
2. Po smíchání, jakmile materiál získá konzistenci měkkého těsta, přitlačte jej na vytvarovanou část.
3. Po vytvrzení brousíte a leštíte obvyklým způsobem.

(Technika se silikonovým klíčem)

1. Odvažte tekutinu v poměru 0,5 ml tekutiny na 1 g prášku. Suroviny rychle promíchejte špachtlí apod.
2. Ihned po smíchání nalijte směs do silikonového klíče a zatlačte model preparovaného zubu opatřený separačním prostředkem.
3. Po vytvrzení brousíte a leštíte obvyklým způsobem.

【Upozornění】

1. Vyhnete se přímému kontaktu s tekutinou nebo se směsí tekutiny a prášku. Při kontaktu s pokožkou ihned setřete alkoholovými tampony. Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte očního lékaře.
2. Materiál používejte v prostoru s dostatečným větráním (několikrát za hodinu).
3. Nevdechujte těkavé složky (páry monomeru) tekutiny. Při vdechnutí přejděte na čerstvý vzduch a odpočívajte. Pokud se objeví příznaky jako závratě nebo bolest hlavy, vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevracejte odebraný (rozdělený) materiál zpět do původní nádoby.
5. Vyhnete se používání v kombinaci s jinými samopolymerujícími (za studena tuhnoucími) pryskyřicemi.
6. Nepoužívejte v blízkosti ohně ani neumísťujte do blízkosti ohně.
7. Nenechávejte výrobek na horkém místě (u sporáku, na přímém slunci apod.).
8. Při leštění používejte ochranné brýle, místní odsávání prachu, prachové masky schválené oprávněnými institucemi apod., abyste předešli účinkům prachu na lidský organismus.

【Poznámka】

1. Pacienti, u nichž se v důsledku použití tohoto materiálu objeví příznaky přecitlivělosti (vyrážka, ekzém, zarudnutí, ulcerace, otok, svědění, necitlivost apod.), mají používání přerušit a poradit se s lékařem.
2. Pracovníci s anamnézou přecitlivělosti (vyrážka, dermatitida) na monomery na bázi MMA se nemají materiálu dotýkat přímo bez rukavic.
3. Pokud se u pracovníků v důsledku použití tohoto materiálu objeví příznaky přecitlivělosti (vyrážka, ekzém, zarudnutí, ulcerace, otok, svědění, necitlivost apod.), přerušete práci a poraďte se s lékařem.
4. (Uživatel a/nebo pacient) Jakákoli závažná událost, která nastala v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, má být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient sídlo/bydliště.

【Skladování】

1. Skladujte na chladném místě (1–30 °C) mimo zdroje tepla nebo přímé sluneční záření.
2. Uchovávejte mimo dosah neautorizovaných osob (neprofesionálů). Uchovávejte pod stálým dohledem.
3. Mějte hasicí přístroj jak v dílně, tak ve skladovacím prostoru.
4. Po použití vždy materiál důkladně uzavřete.
5. Neskladujte výrobky ve velkém množství.

【Informace o likvidaci】

Zbytky zásob musí být zlikvidovány v souladu s odpovídajícími národními právními požadavky.

【Možné nebezpečí】

Tento výrobek může způsobit alergické reakce, jako jsou vyrážky a dermatitida.

【Symboly na obalu】

Význam symbolů na obalu je následující:

Symbol	Marks	Meaning	Symbol	Marks	Meaning	Symbol	Marks	Meaning
		Zdravotnický prostředek			Nepoužívat, pokud je obal pokoven			Výrobce
		Viz návod k použití			Chraňte před slunečním zářením			Číslo šarže
		Nepoužívat opakovaně			Hořlavé			Použitelné do (datum expirace)
		Jedinečný identifikátor prostředku (UDI)			Pouze na lékařský předpis			Označení CE

【Vyrobeno:】



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium